

SANYRENE

Wyrób medyczny

SKŁAD I POSTAĆ

SANYRENE to olejek do pielęgnacji skóry, bogaty w glicerydy kwasów tłuszczowych (olej kukurydziany: 99%) i zawierający aromat anyżkowy (1%).

SANYRENE ma postać sprayu w butelce zabezpieczonej przed otwarciem.

WŁAŚCIWOŚCI

- SANYRENE sprawia, że skóra jest bardziej elastyczna (działanie zmiękczone).
- SANYRENE pomaga utrzymać odpowiednie dotlenienie skóry podczas ucisku.

WSKAZANIA

SANYRENE jest przeznaczony do użytku miejscowego w celu:

- Zapobiegania odleżynom w obszarze miednicy u pacjentów narażonych na powstanie odleżyn,
- Zapobiegania ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych u pracowników służby zdrowia lub osób mających liczne kontakty społeczne.

PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować u dzieci.
- Nie stosować na rany.
- Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na produkt lub jego składnik.

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Do użytku zewnętrznego tylko na skórę.

Zapobieganie odleżynom

1. Umyj ręce przed i po użyciu produktu.
2. Wykonaj pojedyncze rozpylenie preparatu na skórę w obszarze miednicy (okolice krętarzy, kości kulszowej i/lub kości krzyżowej).
3. Delikatnie rozprowadź olejek opuszkami palców przez około minutę. Aby uniknąć uszkodzeń skóry, nie wykonuj intensywnego wcierania i masowania. Miejscowe stosowanie SANYRENE musi następować w ramach całościowej opieki nad pacjentem, która może obejmować również odciążanie, częste zmiany pozycji i mobilizację ciała, regularne pełne kontrole stanu skóry, ochronę przed nadmierną wilgocią, zabezpieczenie w związku z nietrzymaniem moczu i właściwe odżywianie.

Zapobieganie ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych

1. Umyj ręce przed i po użyciu produktu.
2. Wykonaj pojedyncze rozpylenie preparatu na palce.
3. Delikatnie rozprowadź olejek opuszkami palców, przez około minutę, w odpowiednich miejscach skóry twarzy (na nosie, policzkach, szczególnie na kościach policzkowych, wokół uszu i/lub na czole). Aby uniknąć uszkodzeń skóry, nie wykonuj intensywnego wcierania i masowania.

Częstotliwość stosowania

SANYRENE należy stosować dwa do czterech razy dziennie, zwłaszcza przy zmianie pozycji lub przed założeniem nowej maski ochronnej. Skuteczne zapobieganie urazom lub ranom spowodowanym długotrwałym noszeniem masek lub okularów ochronnych wymaga regularnego i częstego stosowania preparatu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- W celu uniknięcia zakażenia mikrobiologicznego, zaleca się, aby nie używać tego samego opakowania produktu SANYRENE u różnych pacjentów.
- Wykonując czynności przy pacjencie należy zachować ostrożność.
- Produkt jest oleisty: należy odczekać kilka minut przed nałożeniem opatrunku lub bandaża na ranę w tym samym miejscu lub przed założeniem maski lub okularów ochronnych.

OSTRZEŻENIA

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie rozpylać w pobliżu otwartego ognia lub żaru.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia butelki z rozpylaczem.
- Preparat przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie połykać. W przypadku połknięcia należy natychmiast wypłukać usta; nie należy wywoływać wymiotów. Spożycie może mieć efekt przeczyszczający.
- W przypadku kontaktu z oczami, ustami lub innymi błonami śluzowymi należy natychmiast wypłukać preparat dużą ilością wody.
- Nie należy masować ani wcierać w skórę, aby uniknąć jej uszkodzeń, szczególnie u pacjentów narażonych na odleżyny.
- W przypadku pojawienia się długotrwałego zaczerwienienia lub nietypowego wyglądu skóry należy skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia, ponieważ może to być objaw zmiany podskórnej, alergii lub innej choroby skóry.
- W przypadku powstania odleżyn lub innych ran należy przerwać stosowanie preparatu i podjąć odpowiednie działania względem rany.

NIEPOŻĄDANE SKUTKI UBOCZNE

W związku z zawartością aromatu w produkcie może wystąpić alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia.



W przypadku wystąpienia poważnego incydentu, który może mieć związek z wyrobem, fakt ten należy zgłosić producentowi (Laboratoires URGO) i właściwemu organowi krajowemu.

Dystrybutor w Polsce:

URGO Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

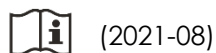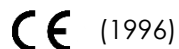

Laboratoires URGO – 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve – Francja